

1. Touches



2. Descriptif du PLEXTALK Pocket

Le haut-parleur et le microphone sont situés en haut de la face avant.

Sous le haut-parleur et le microphone se trouvent à droite la touche Marche/Arrêt, à gauche la touche Enregistrement.

Au milieu de l'appareil, la touche Lecture/Stop est entourée des touches de navigation, et, de part et d'autre, des touches de fonction.

Le pavé numérique se situe vers le bas de l'appareil.

Sur la tranche supérieur, vous trouvez la prise casque et l'entrée/ligne ;

sur le côté droit, l'ajustement du volume et le verrouillage-clavier ;

sur la tranche inférieure, la prise d'alimentation et le connecteur Mini-USB ;

sur le côté gauche, le lecteur de carte SD.



3. Description des touches

Touche Marche/Arrêt : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil, par un appui d'au moins 2 secondes. Lorsque l'appareil est allumé, des pressions brèves sur la touche Marche/Arrêt permettent de régler le délai de mise en sommeil de 15 minutes à 2 heures.

Touche Enregistrement : un appui bref active le mode enregistrement. Un second appui débute l'enregistrement sur la carte SD. L'enregistrement peut être mis en pause en appuyant à nouveau sur Enregistrement, ou arrêté avec la touche Lecture/Stop. L'enregistrement sur la carte SD se fait au format DAISY. Si la touche Enregistrement est maintenue enfoncée, vous enregistrez alors un mémo, stocké dans la mémoire interne PTP1.



Touche Lecture/Stop : permet de commencer ou d'arrêter la lecture, et de valider une option dans le menu.

Les flèches de direction : pour sélectionner le niveau, utilisez les flèches Haut et Bas, et une fois le niveau choisi, utilisez les flèches Gauche et Droite pour sélectionner un élément.

Exemple : dans un ouvrage DAISY pour lequel les numéros de page sont indiqués, choisissez le niveau « page » à l'aide des flèches Haut et Bas. Ensuite, un appui sur la flèche Gauche vous amène à la page précédente, un appui sur la flèche Droite à la page suivante. Pour des enregistrements audio, on peut ainsi passer à la piste suivante ou précédente.

Dans un livre ou un ouvrage audio, on peut se déplacer par sauts dans le temps en maintenant enfoncée la flèche Gauche ou Droite. Le temps écoulé est annoncé au fur et à mesure.



Touche Signet : un appui pour atteindre un signet, deux appuis pour insérer un nouveau signet, trois appuis pour supprimer un signet.

Touche Menu : appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu. Choisissez ensuite entre « Édition », « Paramètres d'enregistrement », « Paramètres de lecture », « Signets », « Mémos vocaux », « Gestion des Supports » et « Paramètres du Système ». Un appui long active la description audio des touches.

Touche Ouvrage : permet de sélectionner la carte SD, la clé USB ou les mémos vocaux. Une fois le support choisi, passez d'un élément à l'autre avec les touches Gauche ou Droite. Les touches Haut et Bas permettent de sélectionner la catégorie, l'ouvrage, le dossier ou le titre.

Touche Aller à : pour atteindre directement une page ou un titre dans un ouvrage DAISY, une piste ou un album dans les fichiers audio, avancer par un pourcentage donné dans un fichier-texte.

Il faut faire suivre l'appui de la touche par un numéro entré sur le pavé numérique, et un appui sur la touche Lecture/Stop.

Le pavé numérique

Réglage de la vitesse : appuyez une fois sur la touche 1 pour régler la vitesse, puis sur les touches Haut et Bas pour accélérer ou ralentir.

Réglage de la tonalité : appuyez deux fois sur la touche 1 pour régler la tonalité, puis sur les touches Haut et Bas pour augmenter les aigus ou les graves.

Information: la touche 5 permet d'obtenir diverses informations sur l'état de la batterie, l'ouvrage en cours, etc. En maintenant la touche 5 enfoncée, l'heure et la date sont annoncées.

Sauvegarde : appuyez sur la touche 9 pour lancer la procédure de sauvegarde, de la clé USB vers la carte SD ou vice-versa. Il suffit de sélectionner l'ouvrage à sauvegarder.

Touche Aide : appuyez sur 0 pour activer la fonction Aide. Celle-ci est au format DAISY, vous pouvez donc la parcourir chapitre par chapitre.

Validation : appuyez sur la touche Dièse pour confirmer une option, un numéro de page, la sélection d'un ouvrage, etc.



Annulation : appuyez sur la touche Étoile pour annuler une procédure, la sélection d'un ouvrage, etc.



4. Exemples

Écoute d'un ouvrage DAISY sur la carte SD

- Insérez la carte SD dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour commencer la lecture.
- Pour écouter un autre ouvrage présent sur la carte, appuyez sur la touche Ouvrage et sélectionnez l'ouvrage avec les touches Gauche et Droite.
- Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour interrompre la lecture.
- Appuyez sur la touche Gauche et maintenez-la enfoncée pour reculer rapidement dans l'ouvrage.
- Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement dans l'ouvrage.
- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour choisir le niveau de navigation, puis sur les touches Gauche ou Droite pour passer d'un élément à l'autre.

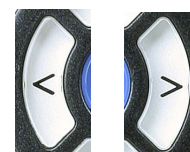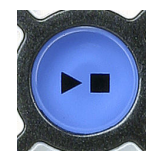

Écouter des titres audio

- Appuyez sur la touche Ouvrage, puis sur les touches Gauche ou Droite pour choisir Audio, puis sur Lecture/Stop. Choisissez la piste avec les touches Gauche ou Droite.
- Vous pouvez aussi aller directement à un album ou à une piste. Appuyez sur la touche Aller à, puis par exemple sur le chiffre 7 et la touche Lecture/Stop pour lire la piste 7 de l'album en cours.



Lire des fichiers-texte ou au format DOC de Microsoft WORD

- Copiez le fichier sur la carte SD.
- Sélectionnez « Fichier-texte » avec la touche Ouvrage.
- Appuyez sur Lecture/Stop pour commencer la lecture.
- La synthèse vocale intégrée lit le texte, vous pouvez choisir entre les 2 voix installées, dans l'option « Paramètres du Système » du menu.
- Vous pouvez vous déplacer dans le texte par phrase, mot, caractère, etc., en utilisant les quatre flèches de direction.



Effectuer un enregistrement vocal (cours, conférence, etc.)

- Appuyez sur la touche Enregistrement. Ceci active le mode « test ».
- Vous pouvez ajuster les paramètres d'enregistrement depuis le menu. Si les paramètres actuels conviennent, appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement. L'enregistrement se fait sur la carte SD .
- Pour passer en pause, appuyez à nouveau sur Enregistrement .
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Lecture/Stop .



Pour créer un mémo vocal (une minute maximum par mémo)

- Appuyez sur la touche Enregistrement et maintenez-la enfoncée pendant que vous parlez dans le micro. Les mémos vocaux sont sauvegardés dans la mémoire interne de l'appareil.



Pour sauvegarder de la carte SD vers une clé USB

- Connectez la clé USB grâce au câble court fourni avec l'appareil.
- Sur la carte SD, sélectionnez l'ouvrage à sauvegarder.
- Appuyez sur la touche 9 pour démarrer la sauvegarde.
- Laissez-vous guider par les instructions vocales.



5. Structure du menu

ÉDITION :

Créer un titre

Annuler un titre

Effacer la section

PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT :

Mode d'enregistrement

Par défaut

Conférence

Audio

Cassette analogique

Radio

Personnalisé

PCM 44.1kHz stéréo

PCM 22.05kHz mono

MP3 256kbps 44.1kHz stéréo

MP3 128kbps 44.1kHz stéréo

MP3 64kbps 44.1kHz mono

MP3 32kbps 22.05kHz mono

Activation ou désactivation de l'assistance vocale pendant l'enregistrement

Assistance vocale activée

Assistance vocale désactivée

Modification de la source audio externe

Mode micro

Mode entrée-ligne

Contrôle automatique du gain

Contrôle automatique du gain activé

Contrôle automatique du gain désactivé

PARAMÈTRES DE LECTURE (ouvrages DAISY et fichiers-texte) :

Paramètres de répétition et de lecture en boucle

Lecture standard

Répétition de l'ouvrage

Lecture du nom du fichier audio en cours

Lecture du nom de fichier audio

Lecture du numéro de la piste audio

PARAMÈTRES DE LECTURE (Audio) :

Paramètres de répétition et de lecture en boucle

Lecture standard

Répétition de la piste

Répétition de l'album

Répétition de tous les albums

Répétition aléatoire

Lecture du nom du fichier audio en cours

Lecture du nom du fichier audio

Lecture du numéro de la piste audio

SIGNETS :

Paramètres de lecture pour les signets vocaux

Signets vocaux activés

Signets vocaux désactivés

Effacer tous les signets dans l'ouvrage en cours

Mémos VOCAUX :

Effacer le mémo vocal sélectionné

Effacer tous les mémos vocaux

GESTION DES SUPPORTS :

Informations sur le support

Effacer la carte SD

Créer un ouvrage

Supprimer l'ouvrage (l'album) sélectionné

Préparation pour édition

Créer le livre

Dossier réseau

PARAMÈTRES DU SYSTÈME :

Propriétés du système

Version du système

Numéro de série

Clé installée (si installée.)

Volume de l'assistance vocale

Voix de lecture de texte

Voix 1

Voix 2

Son d'attente

Son d'attente 1

Son d'attente 2

Pas de son d'attente

Bips clavier

Bip clavier activé

Bip clavier désactivé

Réglage de la date et de l'heure

Tonalité de la voix de synthèse

Paramètres réseau

Confirmer les paramètres réseau

Chargement des paramètres réseau

Réinitialiser avec les valeurs par défaut